

# YAMADA

ขพ.744/2565

## BACK SUPPORT BELT เข็มขัดพยุงหลัง

MODEL :  
**Y001**

ใบรับจดทะเบียนที่ 65-2-3-2-0001865

- ช่วยพยุงกล้ามเนื้อหลังด้านล่าง
- บรรเทาอาการปวดหลังจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน
- SUPPORTING YOUR LOWER BACK.
- RELIEVE BACK PAIN FROM PROLONGED SITTING.

**แกนพยุงหลัง 6 แกน**  
ทำจากโพลีโพรพิลีน



**ผ้าที่ยืดชั้นในและชั้นนอก**  
ผลิตจากโพลีเอสเตอร์

การเก็บรักษา : จัดเก็บในพื้นที่แห้งและหลีกเลี่ยงแสงแดด  
STORAGE : KEEP IT IN DRY PLACE AND AWAY FROM SUNLIGHT.



ขนาดเข็มขัดพยุงหลัง BACK SUPPORT BELT SIZE

SIZE	WAISTLINE	WEIGHT
S	20"-26"	460 g
M	26"-32"	464 g
L	32"-38"	490 g
XL	38"-44"	540 g
XXL	44"-50"	650 g

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเอลดีวิลด์ จำกัด  
253/1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-016-6666

โรงงานได้รับการรับรอง : ISO13485

ผลิตโดย : บริษัท ชือชียจวง ออโพลด์ เมดิคอล ดีไวซ์ จำกัด  
ตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ในชั้นที่ 4 ในเลขที่ 202 ของกรี ซัพพอร์ตติ้ง อินดัสทริยล ของเลขที่ 389  
ถนนหิ่งชาน ไฮ-เทคโซน ชือชียจวง เหนือเป่ย์ ประเทศจีน

Manufacturer : SHIJIAZHUANG AOFEITE MEDICAL DEVICE CO.,LTD.  
East and southeast side in the fourth floor in the NO.202 of gree supporting industrial of NO.389 hengshan  
street high-tech zone Shijiazhuang, Hebei, China.



# YAMADA

ขพ.744/2565

## BACK SUPPORT BELT เข็มขัดพยุงหลัง

MODEL :  
**Y001**

ใบรับจดแจ้งที่ 65-2-3-2-0001865

สายคล้องบ่ากว้าง 1½ นิ้ว ปรับสั้นยาวได้

SHOULDER STRAPS IS 1½ INCH WHICH CAN BE ADJUSTED.

แถบสะท้อนแสงเมื่อใช้งานในเวลากลางคืน

REFLECTIVE STRIPS TO ENSURE THE ALL THE WAY THROUGH THE NIGHT.



แกนพยุงหลังด้านใน 6 แกนทำจากโพลีโพรพิลีน

SIX BACK SUPPORT AXES MADE BY POLYPROPYLENE.



ผ้าภายในและชั้นนอกผลิตจากโพลีเอสเตอร์

THE INNER AND OUTER ELASTIC CLOTH ARE MADE FROM POLYESTER.



### วิธีการใช้งาน (HOW TO USE)



- สอดแขนทั้ง 2 ข้างผ่านสายคล้องไหล่ ให้แผ่นรองหลังอยู่ด้านหลัง
- ติดแผ่นรองหลังเข้าหากันให้กระชับกับเอว
- ติดแผ่นเสริมความกระชับที่อยู่ชั้นนอกสุด เพื่อเพิ่มความกระชับมากขึ้น
- ปรับสายคล้องไหล่ให้กระชับพอดี ไม่อึดอัด

- SLIP THE BACK ON BY PASS BOTH OF YOUR ARMS THROUGH THE SHOULDER STRAPS AND KEEP BACKPLATE AT THE BACK
- FASTEN OUTER ELASTIC BANDS AT YOUR SIDE.
- GRASP THE OUTER BANDS AND STRETCH FORWARD.
- SECURE BANDS IN A COMFORTABLE POSITION.

### ข้อแนะนำ (SUGGESTION)

ควรเลือกสวมใส่เข็มขัดพยุงหลังให้  
เหมาะสมขนาดรูปร่างผู้สวมใส่

CHOOSE THE BACK SUPPORT BELT, WHICH  
IS APPROPRIATE AND FIT TO YOUR SIZE.

### คำเตือน (WARNING)

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับ  
เครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

NOTICE THE WARNING ON THE LABEL AND  
ACCOMPANYING DOCUMENTS BEFORE USE.

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเอลดีวิลด์ จำกัด  
253/1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-016-6666

โรงงานได้รับการรับรอง : ISO13485

ผลิตโดย : บริษัท ชีเจียจวง ออฟทีดี เมดิคัล ดีไวซ์ จำกัด  
ตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ในชั้นที่ 4 ในเลขที่ 202 ของกรี ซัพพอร์ตติ้ง อุตสาหกรรม ของเลขที่ 389  
ถนนหิ่งชาน ไฮ-เทคโซน ชีเจียจวง เหม่เป่ย์ ประเทศจีน

Manufacturer : SHIJIAZHUANG AOFEITE MEDICAL DEVICE CO.,LTD.

East and southeast side in the fourth floor in the NO.202 of gree supporting industrial of NO.389 hengshan street high-tech zone Shijiazhuang, Hebei, China.