



# Walking stick

## ไม้เท้า **มาตรฐาน** รุ่น **WS01**

290 -

ISO 13485



“น้ำหนัก 0.36 kg”

- วัสดุทำจากอลูมิเนียมแข็งแรง ทนทาน สวยงาม น้ำหนักเบา
- จุดพลาสติกป้องกันการลื่น
- ออกแบบด้ามให้จับถนัดมือ
- สามารถปรับระดับความสูงได้

วัสดุ	อลูมิเนียม
น้ำหนักสินค้า	0.36 kg
ความสูง	ปรับระดับได้ 71-94 cm

### วิธีการใช้งาน

1.การปรับระดับความสูงให้เหมาะสมกับสรีระ วิธีการปรับ : กดสปริงล็อกค้างไว้ด้วยนิ้วมือเพื่อปรับระดับความสูงให้พอดี ยึดสกรูตรงกลางให้แน่นแล้วจึงจะสามารถใช้งานได้ Adjust the walking stick (walking aid) to the suitable height.  
Adjust Method: press the spring lock with finger to adjust to the suitable height, fix the middle screw nut tightly, then it can be used.

2.ตรวจสอบว่าด้ามจับนั้นแน่นพอหรือไม่ หากด้ามจับหลวม บ้างกันไม่ให้ส่วนที่คลายออกนั้นเป็นอันตรายต่อคุณ และระวัง การที่มเท้าเหยียบมือของคุณ Examine whether the handle is loose or it has sting. Prevent the loose handle from endangering you, and be careful of the sting hurting your palms.

### ข้อแนะนำ

เหมาะสำหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ยังสามารถเดินได้ด้วยตนเองอยู่บ้าง หรือมี ปัญหาในการเดินชั่วคราว การใช้ไม้เท้าจะช่วยให้ในเรื่องของการทรงตัว และ ช่วยพยุงเดิน ทรงตัวขณะเดิน

SUITABLE FOR PATIENS OR ELDERLY PEOPLE WHO CAN WALK ON THEIR OWN OR TEMPORAY WALKING PROBLEMS. WALKING STICKS CAN HELP THEM TO SUPPORT THEMSELVES.



### ข้อควรระวัง

หมั่นตรวจสอบจุดยางกับพื้นและด้ามจับไม้เท้าหากพบการชำรุดห้ามให้ผู้ป่วยใช้เด็ดขาด

CHECK THE READINESS CONDITION BEFORE USE AND IF A DEFECT IS FOUND ABSOLUTELY DO NOT ALLOW THE PATIENT TO USE IT.






นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเฮลท์เวิลด์ จำกัด 253/1038 ซอยเคhrenร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร.02-016-6666

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ : HEALTH CARE PRODUCT



# อะไหล่ เครื่องเป่าลม C10


## SPARE PART FOR AIR INFLATOR

1	อะไหล่ เทปกั้นความร้อน - เครื่องเป่าลม C10 Spare part heat tape-Air inflator		1 ปี หรือ ตามสภาพการใช้งาน	20
2	อะไหล่ สายพานเทฟลอน - เครื่องเป่าลม C10 Spare part teflon belt-Air inflator		1 ปี หรือ ตามสภาพการใช้งาน	100
3	อะไหล่ ยางครอบล้อ - เครื่องเป่าลม C10 Spare part rubber ring-Air inflator		1 ปี หรือ ตามสภาพการใช้งาน	100
4	อะไหล่ ใบมีด 45090 - เครื่องเป่าลม Q10,Q15-D,C10 Spare part blade 45090-Air inflator		1 ปี หรือ ตามสภาพการใช้งาน	50
5	อะไหล่ บล็อกให้ความร้อน C10 Spare part for Air inflator C10 : heating blocks		2 ปี หรือ ตามสภาพการใช้งาน	1000


### วิธีการเปลี่ยนเทปกั้นความร้อน หรือสายพาน หรือยางครอบล้อ

1.ถอดฝาครอบ โดยใช้ไขควงขันน็อตทั้ง 4 จุด ทวนเข็มนาฬิกา

เมื่อเริ่มเทปกั้นความร้อนเก่าฉีกขาด เสียหาย ส่วนมากจะเปลี่ยนพร้อมกับสายพาน  
ถ้าพบว่าขอบฟิล์มซิลปิดไม่แน่น หรือขอบซิลแตก ให้ตรวจสอบความเสียหายของขอบสายพาน

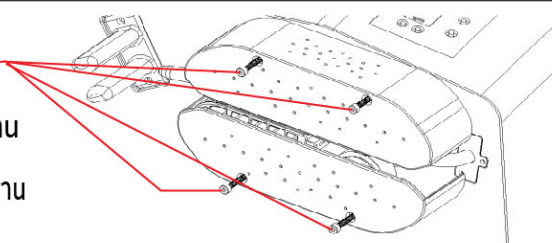

2.กดที่บล็อกตรงกลางของบล็อกทำความร้อน เลื่อนไปทางขวาเพื่อให้สายพานหลวมแล้วถอดสายพานออก

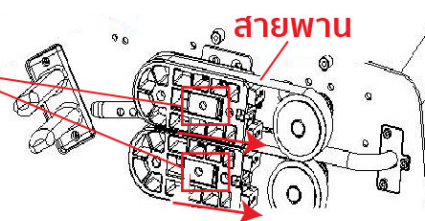

3.ลอกเทปกาวอันเดิมออก โดยการแกะเทปกาวใหม่เข้าไปในขณะเดียวกันที่เทปกาวอันเดิมออกพร้อมกัน




### วิธีการเปลี่ยนใบมีดรุ่น 45090

1.ถอดฝาครอบ โดยใช้ไขควงขันน็อตทั้ง 3 จุด ทวนเข็มนาฬิกา

2.เลื่อนท่อลมไปทางขวาเพื่อเลื่อนท่อลมออก



3.ถอดน็อตใบมีด โดยใช้ไขควงหมุน ทวนเข็มนาฬิกา

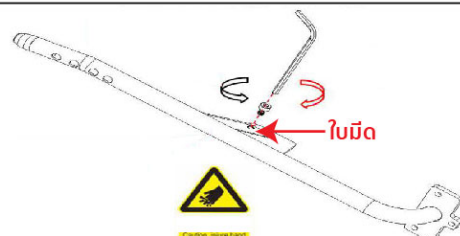



WALKING STICK

# ไม้เท้าช่วยเดิน รุ่น WSO3

CE ISO13485, ISO9001

## ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATION)

รองรับน้ำหนักได้สูงสุด <b>MAX. LOADING</b>	:	≤100 kg
ความสูงของสินค้า <b>PRODUCT HEIGHT</b>	:	73.5-96 cm
ปรับระดับความสูง <b>ADJUSTABLE HEIGHT</b>	:	10 Levels
น้ำหนักสุทธิ <b>NET WEIGHT</b>	:	700 g

## คุณสมบัติการใช้งาน / USAGE FEATURES

1. โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
  2. ปรับระดับความสูงได้ถึง 10 ระดับ
  3. รองรับน้ำหนักได้ ≤100 กก.
  4. มีจุดยกกันสั่นเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
1. Made of aluminum structure with thickness of 1.2 mm. which is strong, durable, and lightweight.
  2. Adjustable height up to 10 levels.
  3. Weight capacity ≤100 kg. increasing safety.

## ขอบเขตการใช้งาน / SCOPE OF APPLICATION

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการอ่อนแรงทั่วไป ทรงตัวลำบาก บาดเจ็บที่ขาหรือฟกช้ำหลังการเข้ารับการผ่าตัดเพื่อช่วยต่อการเดิน ขณะพักฟื้นรวมถึงผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวลำบาก

The walking stick is intended to be used for people who are experiencing generalized weakness, difficulty with balance, a lower extremity injury or postoperative recovery after surgery, including elderly who have difficulty moving.

## วิธีใช้ / HOW TO USE



ใช้สำหรับพยุงตัวขณะเดิน เมื่อต้องการปรับระดับความสูงให้กดปุ่มบนตัวไม้เท้าแล้วดันขึ้น อุปกรณ์จะล็อกโดยอัตโนมัติ

The walking stick is used to support walking. In order to adjust the height, press the button on the legs and pull the walking stick up. The device will automatically lock.

## การจัดเก็บ / STORAGE

ควรเก็บในที่แห้งและห่างไกลจากความร้อน

The walking stick should be kept away from humidity, ventilated and away from sunlight.

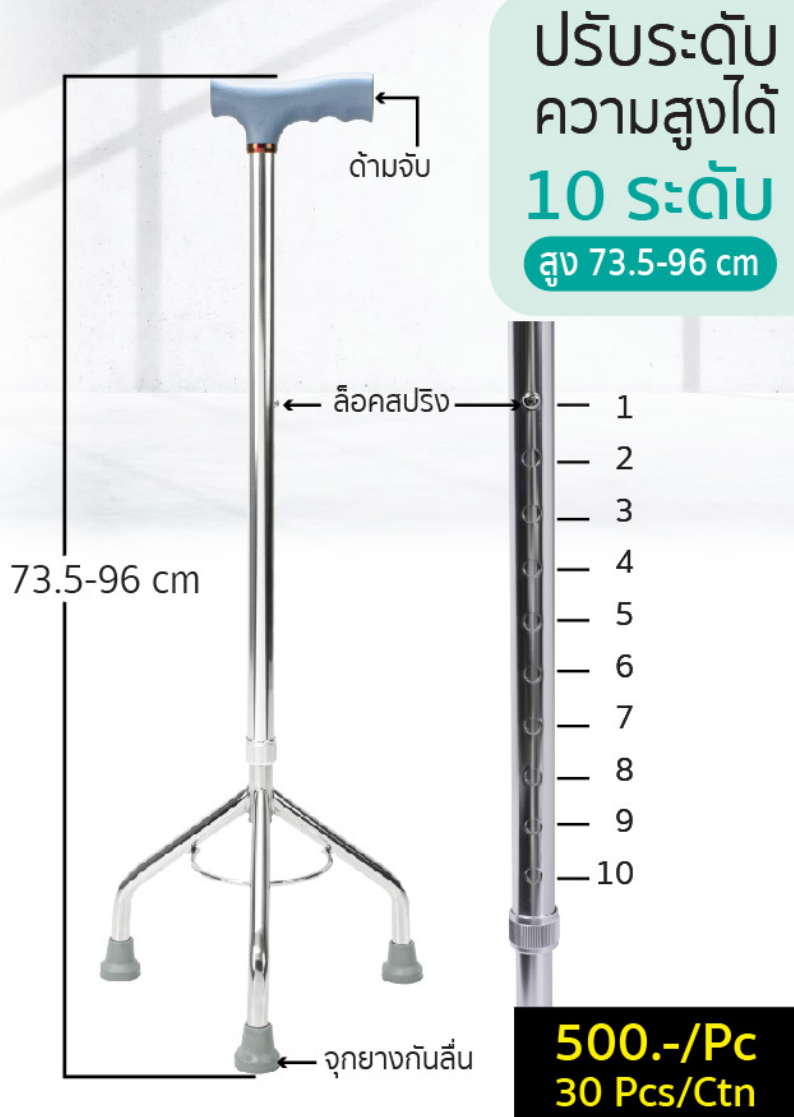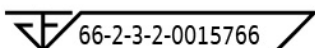

## ข้อควรระวัง / CAUTIONS

- ห้ามใช้ไม้เท้าในการช่วยพยุงตัวขณะลุกขึ้น เด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ไม่ควรเดินและหักเลี้ยวเร็วเกินไปขณะใช้งาน
- ระมัดระวังขณะเดินบนพื้นขรุขระหรือเปียก
- Never use your walking to pull you up into standing as it may cause an accident.
- Walk at a safe, comfortable pace and do not turn too quickly.
- Be careful when walking over uneven or wet ground.



## คำเตือน (WARNING!)

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

Notice the warning on the label and accompanying documents before use.



# เครื่องขัดกระดาษทราย ORBITAL SANDER

**THE ROCK OF  
POWER**

# 4025

ตีประสิทธิภาพ ในการขัด

กำลังเครื่อง **260W**

ความเร็วรอบ NO LOAD SPEED

**14000 RPM**

Sr.No	Description	Thai Name	QTY	Price	Remak
1	Spacer		1		
2	Bearing629rs		1		
3	Bearing flange		1		
4	Amature		1		
5	Screw		2		
6	Creepage circle		1		
7	Spacer		1		
8	Bearing627rs		1		
9	Stator		1		
10	Dustproof sleeve		1		
11	Switch		1		
12	Baffle		1		
13	Housing		1		
14	Label		1		
15	Bursh holder		2		
16	Carbon brush		2		
17	Coil spring		2		
18	Screw		4		
19	Up cover		1		
20	Screw		8		
21	Wiring terminal		1		
22	Tension plate		1		
23	Cable sheath		1		
24	Cable		1		
25	Center cover		1		
26	Screw		2		
27	Eccentric		1		
28	Bearing6200rs		1		
29	Spacer		1		
30	Screw		1		
31	Leg		2		
32	Leg clamp		2		
33	Steel clamp		2		
34	Steel clamp sleeve		2		
35	Liver		2		
36	Liver sleeve		4		
37	Base		1		
38	Spongy cushion		1		
39	Screw		4		

# ไม้เท้าเก้าอี้ รุ่น WSO5

## ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATION)

รองรับน้ำหนักได้สูงสุด

**MAX. LOADING** : ≤100 kg

ความสูงของสินค้า

**PRODUCT HEIGHT** : 84 cm

เส้นผ่านศูนย์กลางที่นั่ง

**SEAT DIAMETER** : 21 cm

สูงจากพื้น

**HEIGHT FROM THE FLOOR** : 50 cm

น้ำหนักสุทธิ

**NET WEIGHT** : 800 g

## คุณสมบัติการใช้งาน / USAGE FEATURES

- รองรับน้ำหนัก ≤100 กก.
- มีจุกยางกันลื่น
- ที่รองนั่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวถึง 21 ซม. และสูงจากพื้น 50 ซม. นั่งสบาย
- ด้ามจับทำจากโฟม นุ่มสบายมือ

- Weight capacity ≤100 kg.
- Footpad is made from non-slip rubber.
- The seat has a diameter of up to 21 cm. and a height of 50 cm. from the floor, sitting comfortably.
- The handle is made of foam, soft and comfortable in the hand.

## การดูแลรักษา / MAINTENANCE

- หมั่นเช็ดทำความสะอาด ไม้เท้าเก้าอี้ อยู่เป็นประจำ
- ตรวจสอบจุกยางอย่างสม่ำเสมอ
- หากอุปกรณ์เสียหายหรือสึกกร่อน กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งาน
- Regularly wipe the walking stick to clean.
- Check the rubber stopper regularly.
- If the device is damaged or corroded, please avoid use.

## การจัดเก็บ / STORAGE

ควรเก็บในที่แห้งและห่างไกลจากความร้อน

The walking stick should be kept away from humidity, ventilated and away from sunlight.

ใบรับจดแจ้งที่ 66-2-3-2-0007453



จุกยางกันลื่น (3 ขา)

## ขอบเขตการใช้งาน / SCOPE OF APPLICATION

ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่ขา หรือพักฟื้นหลังการเข้ารับการผ่าตัด เพื่อช่วยพยุงตัวในการเดินขณะพักฟื้นรวมถึงผู้สูงอายุ ที่เคลื่อนไหวลำบาก

The walking stick is intended to be used for people who are experiencing generalized weakness, difficulty with balance, a lower extremity injury or postoperative recovery after surgery, including elderly who have difficulty moving.

## วิธีใช้ / HOW TO USE

ใช้สำหรับพยุงตัวขณะเดิน นอกจากนี้ยังสามารถกางที่รองนั่งได้ทันทีเพื่อนั่งพักผ่อน

The walking stick is used for supporting the body while walking. The seat can be spread out to sit and relax.

## ข้อควรระวัง / CAUTIONS

- ห้ามใช้ไม้เท้าในการช่วยพยุงตัวขณะลุกขึ้นเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ไม่ควรเดินและหักเลี้ยวเร็วเกินไปขณะใช้งาน
- ระมัดระวังขณะเดินบนพื้นขรุขระหรือเปียก
- Never use your walking to pull you up into standing as it may cause an accident.
- Walk at a safe, comfortable pace and do not turn too quickly.
- Be careful when walking over uneven or wet ground.



## คำเตือน (WARNING!)

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

Notice the warning on the label and accompanying documents before use.

# Walker

วอล์คเกอร์ช่วยเดิน

# YAMADA

สามารถ **พับเก็บได้**

รุ่น **WK01**



- วัสดุทำจากอลูมิเนียม แข็งแรง น้ำหนักเบา
- สะดวกต่อการพกพา

**1,350.-**

**ISO 13485**

วัสดุ	อลูมิเนียม
น้ำหนักสินค้า	4.8 kg
ขนาดสินค้า	46x47x78-96
ความสูง	78-96 cm

## วิธีการใช้งาน (How to use)

1. ความสูงของวอล์คเกอร์ควรอยู่ในระดับพอดีกับเอว จับวอล์คเกอร์บริเวณที่จับให้ข้อศอกงอ 30 องศา The walker should be hip height. Hold the hand grips with your wrists straight and elbows slightly bent (30 degrees).
2. ยืนทั้งน้ำหนักที่ขาทั้งสองข้าง วางวอล์คเกอร์ข้างหน้าห่างจากนิ้วเท้า 6-8 นิ้ว (15-20 ซม.) Stand with your weight on both legs. Place the walker 6 to 8 inches in front of your toes.
3. ใช้น้ำหนักลงบนมือ ก้าวเข้าไปในวอล์คเกอร์ด้วยขาหนึ่งข้างจากนั้นก้าวขาอีกข้างตามไป While supporting your weight on your hands, step into the walker with one leg, then bring your other leg forward.

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเฮลตี้เวลด์ จำกัด  
253/1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต  
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร.02-016-6666

## ข้อแนะนำ (Suggestion)

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการควบคุมการทรงตัว การเดิน หรือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้

SUITABLE FOR PATIENS WITH IMPAIRED BALANCE  
IN WALKING OR WEAKNESS OF THE LEG MUSCLES TO  
ENCOURAGE PATIENTS TO BE ABLE TO HELP THEMSELVES.



## ข้อควรระวัง

หมั่นตรวจสอบจุกยางกันลื่นและหาพบการชำรุดห้ามให้ผู้ป่วยใช้เด็ดขาด

CHECK THE READINESS CONDITION BEFORE USE AND  
IF A DEFECT IS FOUND ABSOLUTELY DO NOT ALLOW  
THE PATIENT TO USE IT.

# SHOWER CHAIR

## เก้าอี้อาบน้ำก้มก้นลิ้น

รุ่น SH01

“น้ำหนัก 3.1 กก.”

950 -

“รับน้ำหนักได้ถึง 80 kg.”



ISO 13485

- วัสดุทำจาก **อลูมิเนียม** น้ำหนักเบา แข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อน
- เบาะรองนั่งแผ่นพลาสติก (PE) รองรับการใช้งานได้มากขึ้น
- จุกพลาสติกป้องกันการลื่นล้ม
- ปรับระดับความสูงได้ 38-56 cm.

### ข้อแนะนำ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการควบคุมการทรงตัว หรือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาที่ไม่สามารถยืนอาบน้ำได้

### วิธีการใช้งาน

- ใช้เพื่อเป็นเก้าอี้ในการอาบน้ำ
- ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

### ข้อควรระวัง



ในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย ควรหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานอยู่เสมอ

	ความลึก 34 cm.
	ความกว้าง 32.5 cm.
	ระดับที่นั่งจากพื้น 38-56 cm.
	ความสูง 38-56 cm.
	ที่นั่งลึก 32.5 cm.
	-
	น้ำหนัก 3.1 กก.

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จำกัด

# SHOWER CHAIR

YAMADA

เก้าอี้อาบน้ำ **ฐานโค้ง** รองรับการนั่งอย่างสะดวกสบาย

รุ่น SH02

“รับน้ำหนักได้ถึง **80 kg.**”

“น้ำหนัก **3.6 กก.**”

1,050 -

- วัสดุทำจาก **อลูมิเนียม** น้ำหนักเบา แข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อน
- เบาะรองนั่งโค้งเข้ารูปทำจากแผ่นพลาสติก (PE) รองรับการใช้งานได้มากขึ้น
- จุกพลาสติกป้องกันการลื่นล้ม
- ปรับระดับที่นั่งได้ 35-45 cm.



## ข้อแนะนำ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการควบคุมการทรงตัว หรือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาที่ไม่สามารถยืนอาบน้ำได้



## ข้อควรระวัง

ในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย ควรหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานอยู่เสมอ

## วิธีการใช้งาน

- ใช้เพื่อเป็นเก้าอี้ในการอาบน้ำ
- ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน



ความลึก 42 cm.



ความกว้าง 50 cm.



ระดับที่นั่งจากพื้น 35-45 cm.



ระดับที่นั่งจากพื้น 39-49 cm.



ที่นั่งลึก 30 cm.



-



น้ำหนัก 3.6 กก.

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จำกัด





# BACKREST SHOWER CHAIR เก้าอี้อาบน้ำ แบบพนักพิง รุ่น SH03

ขพ.1875/2566

## คุณสมบัติการใช้งาน / USAGE FEATURES

- ปรับระดับความสูงได้ถึง 5 ระดับ ตั้งแต่ 72-82 ซม.
- รองรับน้ำหนักได้ ≤ 100 กก.
- มีจุดยางกันลื่น
- Adjustable height up to 5 levels from 72-82 cm.
- Weight capacity ≤ 100 kg.
- Footpads are made from non-slip rubber.



## วิธีการใช้งาน เก้าอี้อาบน้ำ / HOW TO USE

- การประกอบพนักพิง ให้นำแท่งอลูมิเนียมแบบทรงตัว L มายึดกับหลังพนักพิง โดยใช้น็อตขนาดสั้นและวงแหวนตรึงไว้ที่รูทั้งสี่
- การประกอบแผ่นรองนั่ง ให้หงายแผ่นรองนั่งขึ้น แล้ววางขาเก้าอี้ตามแนว 45 องศา ซ้อนทับกัน และนำแท่งอลูมิเนียมทรงตัว L ที่ยึดกับพนักพิง แล้ววางทับด้านบนจากนั้นใช้น็อตขนาดยาว และวงแหวนในการยึดรูทั้งสี่ ตรงกลางให้ใช้น็อตขนาดกลางและวงแหวนยึดเข้ากับแผ่นรองนั่ง
- การปรับระดับความสูง ให้กดปุ่มบนขาเก้าอี้แล้วดันขึ้นทีละข้าง อุปกรณ์จะล็อคโดยอัตโนมัติ
- Assembling the backrest : Bring a L-shape aluminum bar to attach to the back of the backrest by using short screws and washers fixed in the 4 holes.
- Assembling the seat pad: Turn the seat upside down then place the legs of the chair along the 45-degree line, overlapping. Put the L-shape aluminum that attach to the backrest on top, then, use long screws and washers to secure 4 holes. At the middle, use medium screw and washer to fix.
- Height adjustment Press the button on the chair leg and push it up one at a time. The device will automatically lock.

## ข้อควรระวัง / CAUTIONS

เพื่อความปลอดภัยควรมีผู้ดูแลอยู่ใกล้ๆ ในการใช้งานเก้าอี้อาบน้ำ ไม่ควรให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุใช้งานตามลำพัง และควรหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานอยู่เสมอ

For safety to use the shower chair, there should be a caretaker nearby. Should not be used by patients or the elderly alone. And should always check the condition of use regularly.

## การดูแลรักษา / MAINTENANCE

- หมั่นเช็ดทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ
- ตรวจสอบจุดยางและตัวล็อคอย่างสม่ำเสมอ
- หากอุปกรณ์เสียหายหรือสึกกร่อน กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งาน
- Regularly wipe the shower chair to clean.
- Check the rubber stoppers and locks regularly.
- If the device is damaged or corroded, please avoid use.

**การจัดเก็บ :** ควรเก็บในที่แห้งและห่างไกลจากความร้อน

**STORAGE :** The walking stick should be kept away from humidity, ventilated and away from sunlight.

ใบรับจดแจ้งที่ 66-2-3-2-0009375



## ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATION)

รองรับน้ำหนักสูงสุด	<b>MAX. LOADING</b>	:	≤100 kg
ขนาดสินค้า	<b>PRODUCT SIZE</b>	:	30x50x72 cm
ความสูงของสินค้า	<b>PRODUCT HEIGHT</b>	:	72-82 cm
ปรับระดับความสูง	<b>ADJUSTABLE HEIGHT</b>	:	5 Levels
น้ำหนักสุทธิ	<b>NET WEIGHT</b>	:	2.95 kg



## คำเตือน (WARNING!)

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับ  
เครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

Notice the warning on the label and  
accompanying documents before use.

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเวิลด์ 253/1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร : 02-016-6666



# SHOWER CHAIR WITH BACK AND ARMS

## เก้าอี้อาบน้ำ แบบพนักพิง-ที่วางแขน รุ่น SH04

### คุณสมบัติการใช้งาน / USAGE FEATURES

- ปรับระดับความสูงได้ถึง 6 ระดับ ตั้งแต่ 71-84 ซม.
- รองรับน้ำหนักได้ ≤ 100 กก.
- มีจุกยางกันลื่น
- Adjustable height up to 6 levels from 71-84 cm.
- Weight capacity ≤ 100 kg.
- Footpads are made from non-slip rubber.



### วิธีการใช้งาน เก้าอี้อาบน้ำ / HOW TO USE

- การประกอบพนักพิง ให้นำแท่งอลูมิเนียมแบบทรงตัว L มายึดกับหลังพนักพิง โดยใช้น็อตขนาดสั้นและวงแหวนตรงไว้ที่รูทั้งสี่
- การประกอบแผ่นรองนั่ง ให้หงายแผ่นรองนั่งขึ้น แล้ววางขาเก้าอี้ตามแนว 45 องศา ซ้อนทับกัน แล้วนำแท่งอลูมิเนียมแบบโค้งมาวางซ้อนทับ จากนั้นใช้น็อตขนาดยาว และวงแหวนในการยึดตรงกลาง และด้านหลังทั้งสองที่เหลือให้ใช้น็อตขนาดสั้น และวงแหวนยึดรูที่เหลือทั้งสองเข้ากับแผ่นรองนั่ง
- การประกอบแผ่นรองนั่งและพนักพิงเข้าด้วยกัน ให้นำแท่งอลูมิเนียมด้านโค้งที่ไม่ติดกับพนักพิงสอดไปในรูของแท่งอลูมิเนียมแบบโค้งที่ยึดอยู่กับแผ่นรองนั่งแล้ว โดยให้ตัวลิ้อคยึดที่รูทั้งสอง
- การประกอบที่วางแขนเข้ากับเก้าอี้ โดยให้ด้านโค้งออกจากตัวเก้าอี้ แล้วจึงกดปุ่มปลดลิ้อคเพื่อสอดแท่งอลูมิเนียมลงไป
- การปรับระดับความสูง ให้กดปุ่มบนขาเก้าอี้แล้วดันขึ้นทีละข้าง อุปกรณ์จะลิ้อคโดยอัตโนมัติ
- Assembling the backrest : Bring a L-shape aluminum bar to attach to the back of the backrest by using short screws and washers fixed in the 4 holes.
- Assembling the seat pad: Turn the seat upside down then place the legs of the chair along the 45-degree line, overlapping. Then bring the bent aluminum bar to put overlap. After that, use long screws and washers to secure the center and back 2 holes. The rest, use the short screws and washers to fix the remaining 2 holes with the seat pad.
- Assembling the seat and backrest together : Insert the curved side aluminum bar of the backrest into the hole of the bent aluminum bar that is attached to the seat plate by fixing the lock on both holes.
- Assembling the armrests to the chair with the curved side away from the chair. Then press the release button to insert the aluminum bar into it.
- Height adjustment : Press the button on the chair leg and push it up one at a time. The device will automatically lock.

### ข้อควรระวัง / CAUTIONS

เพื่อความปลอดภัยควรมีผู้ดูแลอยู่ใกล้ๆ ในการใช้งานเก้าอี้อาบน้ำ ไม่ควรให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุใช้งานตามลำพัง และควรหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานอยู่เสมอ

For safety to use the shower chair, there should be a caretaker nearby. Should not be used by patients or the elderly alone. And should always check the condition of use regularly.


### การดูแลรักษา / MAINTENANCE

- หมั่นเช็ดทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ
- ตรวจสอบจุกยางและตัวลิ้อคอย่างสม่ำเสมอ
- หากอุปกรณ์เสียหายหรือสึกกร่อน กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งาน
- Regularly wipe the shower chair to clean.
- Check the rubber stoppers and locks regularly.
- If the device is damaged or corroded, please avoid use.

**การจัดเก็บ :** ควรเก็บในที่แห้งและห่างไกลจากความร้อน


STORAGE : The walking stick should be kept away from humidity, ventilated and away from sunlight.

ใบรับจดแจ้งที่ 66-2-3-2-0009375

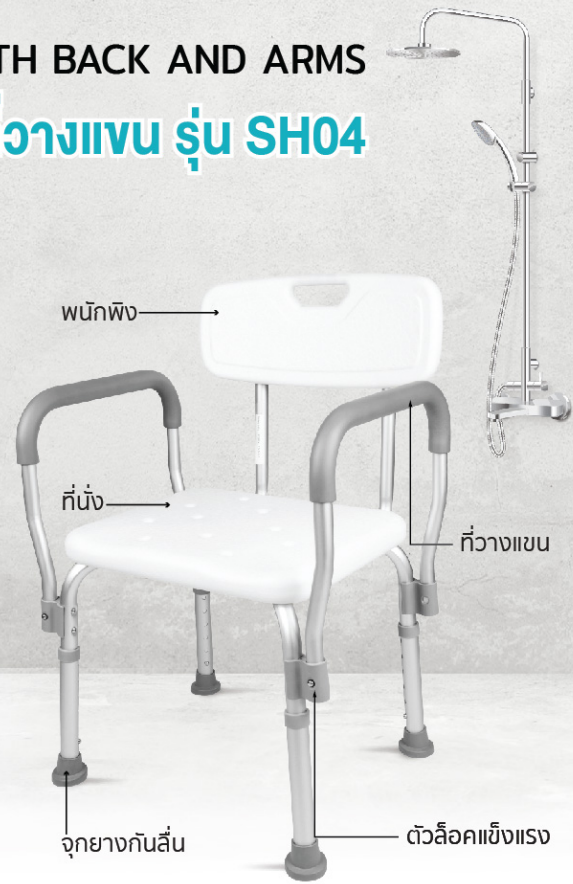

### ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATION)

รองรับน้ำหนักสูงสุด	MAX. LOADING	: ≤100 kg
ขนาดสินค้า	PRODUCT SIZE	: 40x34x71 cm
ความสูงของสินค้า	PRODUCT HEIGHT	: 71-84 cm
ปรับระดับความสูง	ADJUSTABLE HEIGHT	: 6 Levels
น้ำหนักสุทธิ	NET WEIGHT	: 3.15 kg

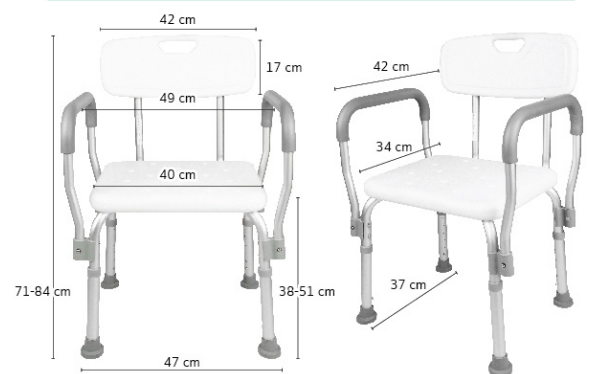

### คำเตือน (WARNING!)

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับ  
เครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

Notice the warning on the label and  
accompanying documents before use.

# เก้าอี้อาบน้ำ รุ่น SH05

## BATH CHAIR

ใบรับจดแจ้งนำเข้าที่ 67-2-3-2-0010985

### คุณสมบัติการใช้งาน


1. โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมหนา 1.25 มม. แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
2. ที่นั่งมีพนักพิง และที่พิงแขน กว้าง นั่งสบาย
3. ปรับระดับความสูงได้ถึง 6 ระดับ ตั้งแต่ 37.5-50 ซม.
4. รองรับน้ำหนักได้  $\leq 150$  กก.
5. มีจุดยกกันสั่นเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน



### วิธีการใช้งาน



ประกอบส่วนพนักพิง (สกรู B)

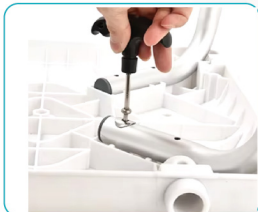

ประกอบส่วนขา (สกรู A)



ประกอบส่วนปรับความสูงของขา



ประกอบพนักพิงกดพื้นล๊อค เอาไว้ขณะเสียบที่พิงแขนลงให้หลังล๊อค และแน่ใจว่าพินเด็งออกมา




ประกอบที่พิงแขนกดพื้นล๊อค เอาไว้ขณะเสียบที่พิงแขนลงให้หลังล๊อค และแน่ใจว่าพินเด็งออกมา



ประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน

### อุปกรณ์ในชุด

1. แผ่นรองนั่ง 1 ชิ้น
2. พนักพิงทรงตัว L 1 คู่
3. ขาเก้าอี้ 2 คู่
4. ที่พิงแขน 1 คู่
5. ขาเก้าอี้ปรับระดับ 2 คู่
6. • วงแหวน 12 ชิ้น  
• สกรู A 8 ชิ้น  
• โข้วคองมือ 1 ชิ้น

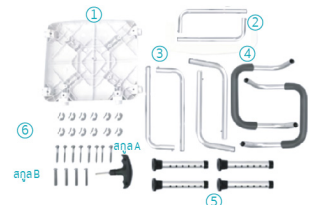

### การดูแลรักษา

1. ห้ามขีดทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ
2. ตรวจสอบจุดยกและตัวล๊อคอย่างสม่ำเสมอ
3. หากอุปกรณ์เสียหายหรือสึกกร่อน ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน

### ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัยควรมีผู้ดูแลอยู่ใกล้ๆ ในระหว่างการใช้งานเก้าอี้อาบน้ำ ไม่ควรให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุใช้งานตามลำพัง และควรหมั่นตรวจสอบการใช้งานอยู่เสมอ

### การจัดเก็บ

ควรเก็บให้ห่างไกลจากความร้อน

### ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATION)

MAX. LOADING :  $\leq 150$  kg

รองรับน้ำหนักสูงสุด :  $\leq 150$  กก.

PRODUCT SIZE : 59.5x48.5x71.5 cm

ขนาดสินค้า : 59.5x48.5x71.5 ซม.

PRODUCT HEIGHT : 71.5-84 cm

ความสูงของสินค้า : 71.5-84 ซม.

ADJUSTABLE HEIGHT : 6 Levels

ปรับระดับความสูง : 6 ระดับ

### คำเตือน (WARNING!)

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับ  
เครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

Notice the warning on the label and accompanying documents before use.

# เก้าอี้อาบน้ำ รุ่น SH06 BATH CHAIR

ใบรับจดแจ้งนำเข้าที่ 67-2-3-2-0010985

## คุณสมบัติการใช้งาน

1. โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมหนา 1.25 มม. แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
2. มีพนักพิง ที่วางแขน และที่นั่งรูปทรงถ้วย สำหรับสอดสายชำระเพื่อการทำความสะอาด กว้าง นั่งสบาย
3. ปรับระดับความสูงได้ถึง 6 ระดับ ตั้งแต่ 37.5-49.5 ซม.
4. รองรับน้ำหนักได้ ≤150 กก.
5. มีจุดยกกันสั่นเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน



## วิธีการใช้งาน



ประกอบส่วนพนักพิง (สกล B)



ประกอบส่วนขา (สกล A)



ประกอบส่วนปรับความสูงของขา



ประกอบพนักพิงกดพื้นลิ้นกเอาไว้ขณะเสียบพนักพิงให้ลงลิ้นก และแน่ใจว่าพินแดงออกมา



ประกอบที่พิงแขนกดพื้นลิ้นกเอาไว้ขณะเสียบที่พิงแขนลงให้ลงลิ้นก และแน่ใจว่าพินแดงออกมา



ประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน

## การดูแลรักษา

1. หมั่นเช็ดทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ
2. ตรวจสอบจุดยกและตัวล็อกอย่างสม่ำเสมอ
3. หากอุปกรณ์เสียหายหรือสึกกร่อน ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน

## ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัยควรมีผู้ดูแลอยู่ใกล้ๆ ในระหว่างการใช้งานเก้าอี้อาบน้ำ ไม่ควรให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุใช้งานตามลำพัง และควรหมั่นตรวจสอบการใช้งานอยู่เสมอ


## การจัดเก็บ

ควรเก็บให้ห่างไกลจากความร้อน



## อุปกรณ์ในชุด

1. แผ่นรองนั่ง 1 ชิ้น
2. พนักพิงทรงตัว L 1 คู่
3. ขาเก้าอี้ 2 คู่
4. ที่พิงแขน 1 คู่
5. ขาเก้าอี้ปรับระดับ 2 คู่
6. • วงแหวน 12 ชิ้น  
• สกล B 4 ชิ้น

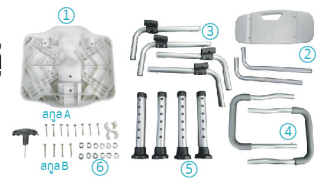

- สกล A 8 ชิ้น
- โขคองมือ 1 ชิ้น

## ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATION)

MAX. LOADING : ≤150 kg

รองรับน้ำหนักได้สูงสุด : ≤150 กก.

PRODUCT SIZE : 55.5x46x71.5 cm

ขนาดสินค้า : 55.5x46x71.5 ซม.

PRODUCT HEIGHT : 71.5-84 cm

ความสูงของสินค้า : 71.5-84 ซม.

ADJUSTABLE HEIGHT : 6 Levels

ปรับระดับความสูง : 6 ระดับ

## คำเตือน (WARNING!)

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับ  
เครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

Notice the warning on the label and accompanying documents before use.

# Steel Wheelchair

YAMADA

วัสดุเหล็กชุบโครเมียม

แข็งแรง ทนทาน

รุ่น YMD-SL19

4,500 -

ISO 13485

“รับน้ำหนักได้สูงสุด 100 kg.”

“น้ำหนักตัวรถ 16.7 kg.”

- โครงสร้างทำจากโครงสร้างทำจากวัสดุเหล็กชุบโครเมียม **แข็งแรง ทนทาน**
- เบาะที่นั่งพีวีซี สีดำ กันน้ำ
- ระบบล้อคล้อบริเวณล้อหลัง
- กระจับเก็บของด้านหลังออกแบบประสงค์
- สามารถพับเก็บได้



## วิธีการใช้งาน

- 1.ถอดยางรถเข็น ไขมีมื่อทั้งสองข้างกดลงบนที่ขอบของที่นั่งทั้งสองข้างพร้อมกัน จนกระทั่งตัวรถเข็นกางออกจนสุด แผ่นหนังที่รองนั่งจะเรียบตึงพอดี
- 2.การหมุนเก็บรถเข็น ไขมีมื่อทั้งสองข้างกับแผ่นหนังที่รองนั่งตรงกึ่งกลางของขอบหน้าและขอบหลังแล้ววกแผ่นหนังที่รองขึ้น จะทำให้ตัวรถเข็นหมุนเข้า
- 3.ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนที่รถเข็นได้ด้วยตนเองโดยไขมีมื่อควบคุมล้อทั้งสองข้าง
- 4.การใช้ที่ห้ามล้อของรถเข็น ตำแหน่งของที่ห้ามล้อจะอยู่บริเวณด้านหลังของรถเข็นใกล้กับล้อใหญ่ซึ่งจะมีอยู่ทั้งสองข้างและมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถเข็นไหล
- 5.การใช้รถเข็นในที่ลาดชันควรจับอย่างมั่นคง













## ข้อแนะนำ

- 1.ไม่นั่งติดต่อกันนานเป็นชั่วโมงโดยไม่ขยับตัว
- 2.พยายามนั่งให้หลังตรง พิงพนักและเข่าอยู่ระดับเดียวกับสะโพก ไม่นั่งไขว่ห้าง
- 3.เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดินซึ่งไม่สามารถเดินได้เป็นปกติ

## ข้อควรระวัง

ตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้งาน และห้ามทิ้งผู้ป้อนไว้บนรถเข็นตามลำพังหากไม่ทำการซื้อคล้อ

## MAIN PARAMETERS(cm)

	106		87
	64		38
	46		100
	58		94X23X89
	20		N.W. 16.7kg. / G.W. 19kg.
	30		
	36		

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเฮลท์เวิลด์ จำกัด

253/1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร.02-016-6666

# Aluminum Wheelchair

รุ่น YMD-AL16

เหมาะแก่การ**เดินทาง** ด้วยล้อหลังเพียง 16 นิ้ว

“รับน้ำหนักได้สูงสุด **100 kg.**”

**YAMADA**

“น้ำหนักตัวรถ **11 kg.**”



5,900 -

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ **แข็งแรง น้ำหนักเบา**
- ระบบเบรคมือสำหรับผู้เข็น
- ระบบล้อคล้อบริเวณล้อหลัง
- กระจับเก็บของด้านหลังออกแบบประสงค์
- สามารถพับเก็บได้
- ล้อหลังขนาด 16" เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว

ISO 13485

## วิธีการใช้งาน

- 1.การกางรถเข็น ไขมือทั้งสองข้างกดลงบนที่ขอบของที่นั่งทั้งสองข้างพร้อมกัน จนกระทั่งตัวรถเข็นกางออกจนสุด แผ่นหนังที่รองนั่งจะเรียบติดพอดี
- 2.การหุบเก็บรถเข็น ไขมือทั้งสองข้างจับแผ่นหนังที่รองนั่งตรงกึ่งกลางของขอบหน้าและขอบหลังแล้วยกแผ่นหนังที่รองขึ้น จะทำให้ตัวรถเข็นหุบเข้า
- 3.การใช้ที่ห้ามล้อของรถเข็น ตำแหน่งของที่ห้ามล้อจะอยู่บริเวณด้านหลังของรถเข็นใกล้กับล้อใหญ่ ซึ่งจะมีอยู่ทั้งสองข้างและมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถเข็นไหล
- 4.การใช้รถเข็นในที่ลาดชันควรจับอย่างมั่นคง

## ข้อแนะนำ

1. ไม่นั่งติดต่อกันนานเป็นชั่วโมงโดยไม่ขยับตัว
2. พยายามนั่งให้หลังตรง พิงพนักและเท้าอยู่ระดับเดียวกับสะโพก ไม่นั่งไขว่ห้าง
3. เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดิน ซึ่งไม่สามารถเดินได้เป็นปกติ

## ข้อควรระวัง

ตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้งาน และห้ามทิ้งผู้ป่วยไว้บนรถเข็นตามลำพังหากไม่ทำการล็อกล้อ

## MAIN PARAMETERS(cm)

	91		89
	54		43
	46		100
	40		80X28X90
	15		N.W 11kg./ G.W. 13.2kg.
	49		
	46		
	12		

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จำกัด

รุ่น

YMD-AL24

# Aluminum Wheelchair



รถเข็นอัลลอยด์ **พับเก็บได้** น้ำหนักเบา

ISO 13485

“น้ำหนักตัวรถ **12.5 kg.**” “รับน้ำหนักได้สูงสุด **100 kg.**”



7,500 -

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ **แข็งแรง ทนทาน**
- เบาะที่นั่งหนังเทียม PU
- ระบบเบรคมือสำหรับผู้เข็น
- ระบบล้อคล้อบริเวณล้อหลัง
- กระจ่างเก็บของด้านหลังอเนกประสงค์
- สามารถพับเก็บได้

## วิธีการใช้งาน

- 1.ถอดรถเข็น ไขมือทั้งสองข้างกดลงบนที่ขอบของที่นั่งทั้งสองข้างพร้อมกัน จนกระทั่งตัวรถเข็นกางออกจนสุด แผ่นหนังที่รองนั่งจะเรียบตึงพอดี
- 2.การรูดเก็บรถเข็น ไขมือทั้งสองจับแผ่นหนังที่รองนั่งตรงกึ่งกลางของขอบหน้าและขอบหลังแล้วรูดแผ่นหนังที่รองนั่ง จะทำให้ตัวรถเข็นหุบเข้า
- 3.ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนที่รถเข็นได้ด้วยตนเองโดยไขมือควบคุมล้อทั้งสองข้าง
- 4.การใช้ที่ก้มล้อของรถเข็น ตำแหน่งของที่ก้มล้อจะอยู่บริเวณด้านหลังของรถเข็นใกล้กับล้อใหญ่ซึ่งจะมีอยู่ที่ทั้งสองข้างและมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถเข็นไหล
- 5.การใช้รถเข็นในที่ลาดชันควรจับอย่างแน่นคง

## ข้อแนะนำ

1. ไม่นั่งติดต่อกันนานเป็นชั่วโมงโดยไม่ขยับตัว
2. พยายามนั่งให้หลังตรง พิงพนักและเข่าอยู่ระดับเดียวกับสะโพก ไม่นั่งไขว่ห้าง
3. เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดิน ซึ่งไม่สามารถเดินได้เป็นปกติ

## ข้อควรระวัง

ตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้งาน และห้ามทิ้งผู้ป่วยไว้บนรถเข็นตามลำพังหากไม่ทำการล็อกล้อ

## MAIN PARAMETERS(cm)

	102		87
	64		36
	46		100
	62		92X28X89
	17.5		N.W.12.5kg./ G.W.14.5kg.
	49		
	๖๐		
	132		

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จำกัด

253/1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร.02-016-6666