



ใบอนุญาตเลขที่ ขพ.1920/2564

ใช้ได้ครั้งเดียว
SINGLE USE ONLY

ถุงมือยางไนไตร


สำหรับการตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย์
EXAMINATION NITRILE GLOVES




199.-/Box

100 ชิ้น/กล่อง
PCS / box

เหมาะสำหรับ • SUITABLE FOR

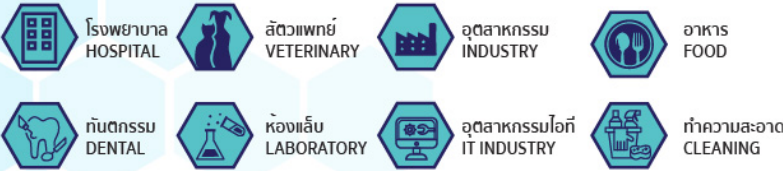

ขนาด Size	WxH
S	8x24 cm
M	9.5x24 cm
L	11x24 cm

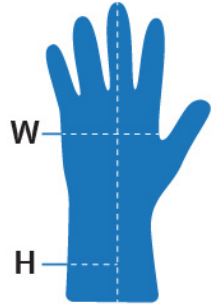

• ผิวไม่เรียบ ไม่มีแป้ง • ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ • ผลิตจากน้ำยางสังเคราะห์
TEXTURED AT FINGER TIP, POWDER FREE | NON-STERILE | MADE OF SYNTHETIC RUBBER

วิธีใช้

1. นำถุงมือออกจากกล่อง ให้ระมัดระวังในการสัมผัส โดยจับถุงมือเฉพาะบริเวณขอบด้านบนของข้อมือ
2. สวมถุงมือทั้งสองข้าง
3. ในการถอดถุงมือให้ถอดถุงมือโดยพลิกด้านในออก
4. ทิ้งถุงมือที่ถอดออกในที่ที่เหมาะสม เช่น ถังขยะ

วิธีการเก็บรักษา

- ควรเก็บในที่แห้ง และไม่ถูกแสงแดด
- ควรเก็บในที่ปราศจากของมีคม

ข้อแนะนำ

ควรเลือกขนาดถุงมือที่เหมาะสมสำหรับตนเอง หลังจากการใช้งานให้ถอดถุงมือโดยพลิกด้านในออกทิ้งอย่างให้สิ่งปนเปื้อนบนถุงมือกระจาย

คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

HOW TO USE

1. Remove the exam glove from the box or packaging. Be careful to only touch at the top edge of the cuff.
2. Put on the gloves.
3. After use, peel the glove away from your hand, allowing the glove to be flipped inside out once removed.
4. Discard of the removed gloves in trash can.

STORAGE

- Always keep it in dry place and avoid the sunlight.
- Always keep away from sharp objects.

SUGGESTION

Choose the appropriate size of gloves to your hands. After use, peel the gloves away from your hand, allowing the glove to be flipped inside out once removed and avoid touching glove surface.

WARNING

Notice the warning on the label and accompanying documents before use.

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท สยามเอลดีวิลด์ จำกัด
253/1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-016-6666

PRODUCED BY : Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.
No.6 Haitang south road ,Suixi Wuhu Modern Industrial
Park,Suixi county, Huaibei City, Anhui Province, P. R. China

โรงงานได้รับการรับรอง : **CE**
Declaration of Conformity
ISO9001, ISO13485




ถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์
แบบไม่มีแป้ง ชนิดบาง

LATEX

Average M size

Weight
5.0G
Length
240mm

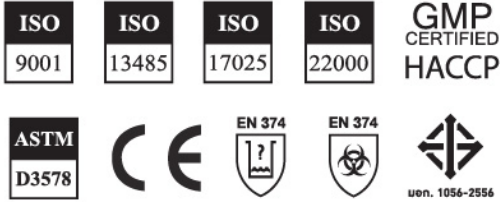

MEDICAL GRADE LATEX **NON-STERILE**
POWDER FREE FOOD SAFE FINGER TEXTURED



280.-/Box

SIZE S M L

ความสบาย



ความแข็งแรง



ความยืดหยุ่น




COLOR

Natural Latex White

100 PCS/ซึบ (By weight/โดยน้ำหนัก)
20 BOX/กล่อง CARTON/ลัง

SINGLE USE

**ถุงมือยางสังเคราะห์
ไม่มีแป้งชนิดบาง**

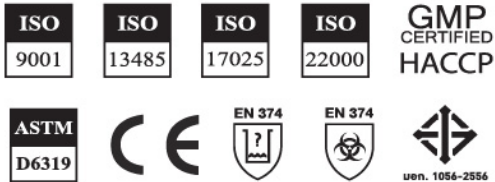

NITRILE **NON-STERILE**



Average M size
Weight
3.5G
Length
240mm

NITRILE



300.-/Box

ถูกพัฒนาให้มีความบางแบบพิเศษ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม ความต้องการ เพื่อความสบายในการสวมใส่ช่วยลดความเมื่อยล้าของมือ และให้รู้สึก สัมผัสเสมือนจริง พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการปกป้องมือ คงความทนทาน ด้วยข้อดี ที่มีหลายประการ จึงเป็นที่นิยมมากทั้งในงานห้องปฏิบัติการงานอุตสาหกรรมอาหาร และงานเอนกประสงค์ทั่วไป ถือได้ว่าเป็นที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก สร้างความมั่นใจได้ถึงความเป็นมืออาชีพ

ความยืดหยุ่น	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ความแข็งแรง	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ความสบาย	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
COLOUR	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Violet Blue</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Pure White</div> </div>

100
PCS/ชั้น
(By weight/โดยน้ำหนัก)

10
BOX/กล่อง
CARTON/ลัง

